

1. A hálózati adaptert csatlakoztassa a készülék hátoldalán lévő AC-9V jelzésű csatlakozóaljzatába, majd ezután a hálózati dugaszolóaljzatba.

A készülék digitális órakijelzője villogni kezd. A kijelző csak akkor villog, ha az óra még nincs beállítva, vagy kiesett a szinkronból, azaz nem a pontos időt mutatja.

2. Az óra beállítása:

Nyomja a készülék elején található TIME feliratú gombot folyamatosan, miközben a MIN gomb megnyomásával a megfelelő perc értéket beállíthatja.

Az óra beállításánál, hasonlóképpen a TIME gomb folyamatos nyomása mellett a HOUR gomb többszöri megnyomásával állíthatja be a kívánt óraértéket. Ügyeljen arra, hogy a készülék hátlapján lévő kapcsoló 24 h állásban legyen.

3. Ébresztő beállítása

Tartsa lenyomva az ALARM gombot. Az ébresztés beállítása az előző pontban leírtaknak megfelelően történik. Ügyeljen arra, hogy az ébresztés funkció csak abban az esetben aktív, ha a készülék jobb szélén lévő AL.OFF nyomógombbal élesíti azt. A beállított ébresztési idő a készülékben automatikusan tárolódik, de csak bekapcsolt állapotban lép működésbe. A bekapcsolt állapotról az óra bal alsó számlapján lévő ALARM feliratú zöld lámpa folyamatos fénye tájékoztatja Önt, mely ébresztéskor villog.

Ébresztés esetén lehetősége van az úgynevezett SNOOZE (szundi) gomb megnyomásával az ébresztés pillanatnyi lekapcsolására. A készülék kb. 9 perc múlva újabb ébresztést kezdeményez.

4. Asztali lámpa üzemmód

Az asztali lámpa a LIGHTjelzésű nyomógomb egyszeri megnyomásával lép működésbe. Ugyanígy kikapcsolható.

5. Hangjelzés

A készülék hangjelzése ébresztéshez vagy a beérkező telefonhívás észleléséhez egyénileg beállítható. A készülék jobb oldalán található VOLUME feliratú gomb segítségével a hangerő tetszőlegesen beállítható. A jelzőhang a MIN állásra forgatásával kiiktatható. A bal oldalon található TONE gomb segítségével a csengőhang magassága állítható be. Egészen mély, bűgő hangtól (300 Hz) a sípoló hangig (3000Hz) a halláscsökkenés jellegének megfelelően állítható.

6. Fényjelzés

Ébresztéskor vagy beérkező telefonhíváskor az asztali lámpa villogni kezd akkor is, ha a lámpa kikapcsolt (OFF) állapotban van. Bekapcsolt lámpa esetén is működik a fényjelzési funkció a világítás megszakításával.

7. Külső telefonhívás érzékelő

Csatlakoztassa a készülékhez mellékelt RJ11 típusú csatlakozóaljzattal szerelt telefonvezetéket a készülék PHONE feliratú csatlakozójához és a fali telefonaljzathoz. Telefonkészülékét ezek után csatlakoztassa a Protone Flash-hez. Ha telefonkészülékét nem csatlakoztatja vagy annak hangját kikapcsolja, a készülék ez esetben is jelzi a beérkező telefonhívást.

A telefontól beérkező jelzés egyértelműségét a homlokapon lévő telefon ábra mellett villogó fény jelzi. Ily módon ugyanazon fény vagy hangjelzés forrása megkülönböztethető.

8. Kapu- vagy ajtócsengő érzékelő



A készülékhez mellékelt rádióhullámú (távirányító) csengőgomb kb. 10 méteres hatósugárban bárhová felszerelhető (pl.: kapu, ajtó). A harang jelzésű gomb megnyomásával az ajtócsengő működését a kopogásérzékelő érzékeli és gyors villogással jelzi.

9. Kopogásérzékelő



A készülékhez mellékelt kopogásérzékelő, elhelyezhető bármely ajtó belső oldalán felcsavarozva vagy felragasztva, de villanójelzőként bárhol elhelyezhetjük a lakásban.

A kopogásjelző egy szelektív hangérzékelő, amely az ajtó rezgéseit (a kopogást) érzékeli. Más hangokra nem ad jelzést. Érzékenysége két fokozatban állítható: L kevésbé érzékeny, H érzékenyebb. O állásban az érzékelő kikapcsolható. Hálózati adapterrel működik, amelyet a DC 4,5-6V csatlakozóaljzathoz kell csatlakoztatni.

10. Villanólámpa



A készülékhez mellékelt villanólámpa segítséget nyújt nappali fényjelzéssel. Az ablakon, vagy az üvegajtón keresztül nappal is észlelhető jelzéseket biztosít. Így akár a kertből is észlelheti ha telefonhívása érkezik.

A villanólámpát Protone Flash VIBRATOR jelű aljzatába csatlakoztassa, majd kapcsolja a kis kapcsolót I állásba. A villanólámpa ébresztéskor folyamatosan villog.

11. Matracrezgő



A nagy erejű rezgőkészülék az ágy matraca vagy párna alá helyezve markáns, pulzáló rezgéseivel ébresztésre és a telefonhívás észlelésére is használható. Amennyiben használni kívánja a rezgőt, csatlakoztassa a Protone Flash készülék hátulján lévő VIBRATOR jelű aljzatba.

12. Figyelmeztetés

Tartsa távol a lámpát éghető vagy tűzveszélyes anyagoktól, sugárzó hőtől, pl. radiátor, kályha stb. Tisztításra kizárólag puha száraz ruhát használjon. Ha hosszú ideig nem kívánja használni a készüléket az adaptert húzza ki a hálózati dugaszolóaljzattól. Úgy helyezze el a készüléket, hogy víz vagy egyéb folyadék ne juthasson bele. Napsütés, eső, erős pára, por hatásának ne tegye ki a készüléket. A készülék külső burkolatát ne távolítsa el, mert áramütés érheti. A készülék szétszerelése, látható szándékos beavatkozásnak számít, ezért nem tartozik a garancia hatálya alá.

A gyártó nem vállal felelősséget semmi olyan eseményért, amely szakszerűtlen használatból ered.

Más készülékkel vagy termékkel való összekötésből eredő károkért a gyártó garanciát nem vállal.

13. Gyártó: Global Assistive Devices Inc. Florida, USA.

14. Márkaszerviz és hazai forgalmazó:
Protone Audio Kft. 1065 Budapest Lázár utca 4.
Telefon: 354-38-11

A készülék rendelkezik CE jelöléssel, mely szerint a gyártó nyilatkozik arról, hogy a készülék kialakításában és működésében megfelel a 89/336/EEC európai direktívának.

A gyártó a készülékre a vásárlás napjától számított egy év garanciát vállal.

A forgalmazó felhívja a figyelmet arra, hogy a készülék csak abban az esetben vásárolható meg TB támogatással ill. írható fel receptre, ha a rendelést megelőző tíz éven belül a vásárló hasonló eszközt nem vett igénybe.

A készülék kihordási ideje tíz év.

Protone Flash

Ébresztő és jelzőrendszer



Protone+