

Protone egyéni uszodai dugó

Tisztítás:

Javasolt a tisztítást külön erre a célra készült tisztítófolyadékkal végezni, vagy oldószermentes langyos szappanos vízzel.

Ápolás:

A füldugó felületét időnként célszerű paraffin vagy babaolajjal bekenni.

Hosszabb ideig ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, mert színe kifakulhat, és anyaga is hamarabb elöregszik.

Tanácsok:

Csak saját fülére készített füldugót használjon!

Még kipróbálásra se adja kölcsön!

Ügyeljen arra, hogy a dugó mindig tiszta állapotban kerüljön a fülbe!

A rendszeres ápolás meghosszabítja a füldugó élettartamát.

Rendszeres használat esetén kérjen hozzá összekötőszinórt.

Ha a füldugó kényelmetlen esetleg töri a fülét;

ha kicsúszik, rosszul illeszkedik;

ha fülében viszketést, allelgiás tüneteket okoz;

ha gondot okoz a behelyezés;

forduljon audiológusához!



Gyártó: Protone Audio Kft.
1065 Budapest, Lázár u. 4.
Tel.: +36 1 3543811
e-mail: protone@protone.hu

ISO 9001
ISO 13485
Tanúsított cég