

# Protone egyéni zajvédő dugó

## Tisztítás:

Javasolt a tisztítást külön erre a célra készült tisztítófolyadékkal végezni, vagy oldószermentes langyos szappanos vízzel.

## Ápolás:

A fül dugó felületét időnként célszerű paraffin vagy babaolajjal bekenni.

Hosszabb ideig ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, mert színe kifakulhat, és anyaga is hamarabb elöregszik.

## Tanácsok:

Csak saját fülére készített fül dugót használjon!

Még kipróbálásra se adja kölcsön!

Ügyeljen arra, hogy a dugó mindig tiszta állapotban kerüljön a fülbe!

A rendszeres ápolás meghosszabbítja a fül dugó élettartamát.

Rendszeres használat esetén kérjen hozzá összekötőszinórt.

Ha a fül dugó kényelmetlen esetleg töri a fülét;

ha kicsúszik, rosszul illeszkedik;

ha fülében viszketést, allelgiás tüneteket okoz;

ha gondot okoz a behelyezés;

forduljon audiológusához!

**Gyártó :** Protone Audio Kft  
1065 Budapest, Lázár u. 4.  
Tel.: +36 1 3543811  
e-mail: protone@protone.hu



ISO 9001  
ISO 13485